


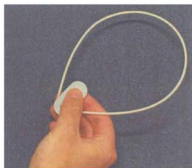

Stap 1

Druk op de knop om de RecoveryRx te activeren , een klein rood lampje zal gaan branden. De RecoveryRx is nu geactiveerd.



Stap 2

Dek de huid af met een steriel gaasje alvorens u de RecoveryRx aanbrengt.



Stap 3

Positioneer de RecoveryRx over de wond. Het therapeutische gebied ligt binnen de lus van de RecoveryRx. (Let er op dat u de huid afdekt met een steriel gaasje voordat de RecoveryRx wordt aangebracht.



Stap 4

Bevestig de RecoveryRx met medische tape.

